

OBLAST POUŽITÍ			PŘÍPRAVEK	ŘEDĚNÍ	EXPOZICE	ÚČINNOST	ZPUSOB		
RUCE	hygienická dezinfekce rukou	STERILLIUM PURE	směs alkoholů	koncentrát 3 ml	30 sec.	A(B)TM(V)	Minimálně 3 ml dezinfekčního přípravku nanést na suché ruce, postupně vtírat předepsanou technikou minimálně 30 sec. dle doporučení výrobce. RUCE UDRŽOVAT VLHKÉ PO CELOU EXPOZIČNÍ DOBU		
		MANUSEPT BASIC	etanol	koncentrát 3 ml	30 sec.	A(B)TM(V) + rotaviry			
		STERILLIUM MED	etanol	koncentrát 3 ml	30 sec.	ABTM(V)			
		ANIOGEL 800 (určen pro veřejné prostory a ambulance)	etanol	koncentrát 3 ml	30 sec.	A(B+)TM(V)			
					1 min.	ABTM(V)			
	chirurgická dezinfekce rukou	STERILLIUM PURE	směs alkoholů	koncentrát 2 x 5 ml	1,5 min.	A(B+)TM(V)	Minimálně 10 ml dezinfekčního přípravku nanést na suché ruce, postupně vtírat předepsanou technikou a po dobu stanovenou výrobcem. Dezinfekci vtírat do rukou a předloktí do úplného zaschnutí. RUCE UDRŽOVAT VLHKÉ PO CELOU EXPOZIČNÍ DOBU		
STERILLIUM MED		etanol	koncentrát 2 x 5 ml	1,5 min.	ABTM(V)				
POKOŽKA A SLIZNICE	dezinfekce pokožky před vpichy, punkcemi, dezinfekce operačního pole (OP)	SKINSEPT F (bezbarvý)	směs alkoholů	koncentrát	15 sec.	A(B)(V)	Na pokožku nanést dostatečné množství dezinfekce a nechat zaschnout. Dodržovat expozici operačního pole dle dezinfikované oblasti (tkáně, které obsahují větší množství tukových buněk potřebují delší expozici - dle etikety). Barvený dezinfekční roztok je vhodný pro vymezení operačního pole. Po úplném zaschnutí operačního pole zkontrolovat, zda nedošlo k zatečení dezinfekce pod pacienta. BRAUNOL a OCTENISEPT používat dle indikace a příbalové informace.		
		SKINSEPT G (barevný)	směs alkoholů	koncentrát	1 min.	A(B)T(V)			
		SEPTODERM SPRAY (bezbarvý)	směs alkoholů	koncentrát	30 sec.	A(B+)T(V)			
		SEPTODERM OP (barevný)	směs alkoholů	koncentrát	30 sec.	A(B+)T(V)			
		BRAUNOL	PVP - jód	koncentrát	1 min.	A(B)(V)			
		CITROCLOREX Clear 2% (bezbarvý)	etanol, chlorhexidin 2%	koncentrát	15 sec.	A(B)T(V)			
	sliznice - před invazivním výkonem na sliznicích, při cévkování	PREVANTICS 2% CHG SWAB	propanol, chlorhexidin 2%	ubrousek	1 min.	A(B)T(V)			
		BRAUNOL	PVP - jód	použít ředění dle příbalového letáku					
	v indikovaných případech předoperační mytí a mytí celého těla včetně vlasů, dekolonizace MRSA	OCTENISEPT	octenidin	koncentrát	2 min.	A(B)(V)	Koncentrát rozetřít, nechat působit, opláchnout, pěnu stačí otřít, utřít jednorázovým ručníkem; v pěnové formě - bezoplachová péče.		
		SKINSAN 2%	KAS,	koncentrát /	1 min.	A(B)(V)			
	SKINSAN 2% FOAM	chlorhexidin 2%	dle potřeby						
NÁSTROJE A POMŮCKY	dekontaminace pomůcek a čištění chirurgických nástrojů (sklo, plasty, předměty z pryže) s následnou sterilizací	BOMIX PLUS	KAS	0,5%	15 min.	A(B)(V)	Zcela ponořit do připraveného roztoku, nechat exponovat, dočistit, opláchnout pitnou vodou, osušit, sterilizovat.		
		GIGAZYME X-TRA	amin, KAS	1%	15 min.	A(B)(V)			
		DISCLEEN EXTRA	KAS, amin	1%	15 min.	A(B)(V)			
		GIGAZYME	enzym	0,5%	15 min.	čisticí prostředek			
	dekontaminace pomůcek a čištění chirurgických nástrojů bez následné sterilizace	CHIROSAN PLUS	kyselina	2%	15 min.	ABCTMV	Zcela ponořit do připraveného roztoku, nechat exponovat, dočistit, opláchnout pitnou vodou, osušit.		
		SEKUSEPT AKTIV	peroxyoctová	2%	30 min.	ABCTMV			
		GIGAZYME X-TRA	amin, KAS	1%	15 min.	A(B)(V)			
		toulce						použití max. 12 hodin	
	myčky pro nástroje a zdravotnické prostředky		řídí se návodem výrobce myčky a výrobce vhodného dezinfekčního přípravku						
	Pro DSD a VSD je nutné se řídit doporučením výrobce zdravotnického prostředku. Výjimku k použití jiného dezinfekčního prostředku schvaluje ústavní epidemiolog.								
	pro přirozeně osídlené dutiny (digestivní endoskopy, kolonoskopy, laryngoskopické lžice)	DSD (druhý stupeň dezinfekce)						1. krok - Zcela ponořit do pracovního roztoku, nechat působit. Po uplynutí expozice dokonale opláchnout pitnou vodou. 2. krok - Zcela ponořit do pracovního roztoku, nechat působit. Po uplynutí expozice opláchnout destilovanou vodou. Stabilita roztoku 2. lázně DSD dle doporučení výrobce dezinfekčního přípravku.	
		BOMIX PLUS 1. lázeň	KAS	0,5%	15 min.	A(B)(V)			
		GIGAZYME X-TRA 1. lázeň	amin, KAS	1%	15 min.	A(B)(V)			
		CHIROSAN PLUS 2. lázeň	kyselina peroxyoctová	2%	15 min.	ABCTMV			
		SEKUSEPT AKTIV 2. lázeň	kyselina peroxyoctová	2%	30 min.	ABCTMV			
		VSD (vyšší stupeň dezinfekce)						1. krok - Zcela ponořit do pracovního roztoku, nechat působit. Po uplynutí expozice dokonale opláchnout pitnou vodou. 2. krok - Zcela ponořit do pracovního roztoku, nechat působit. Po uplynutí expozice opláchnout sterilní vodou. Stabilita roztoku 2. lázně VSD dle doporučení výrobce dezinfekčního přípravku.	
		BOMIX PLUS 1. lázeň	KAS	0,5%	15 min.	A(B)(V)			
		GIGAZYME X-TRA 1. lázeň	amin, KAS	1%	15 min.	A(B)(V)			
		CHIROSAN PLUS 2. lázeň	kyselina peroxyoctová	2%	15 min.	ABCTMV			
		SEKUSEPT AKTIV 2. lázeň	kyselina peroxyoctová	2%	30 min.	ABCTMV			
		Druhou lázeň VSD a DSD může nahradit myčka endoskopů. Koncentraci a expozici řeší automaticky nastavený program myčky. Použitá dezinfekce dle doporučení výrobce myčky.							
		MALÉ PLOCHY	DEZINFEKCE MALÝCH PLOCH A POMŮCEK - systém INCIDIN WIPES (systém suchých utěrek)	INCIDIN PRO	amin, alkohol, KAS (CAS:122-99-6)	1%	15 min.	A(B)(V)	Naředít 3 l roztoku, přelit přes suché utěrky v zásobníku, řádně označit, kontrolovat expiraci, stabilita systému je 28 dnů.
SURFANIOS PREMIUM				KAS (CAS:2372-82-9)	1%	15 min.			
RYCHLÁ DEZINFEKCE MALÝCH PLOCH vyšetřovací a zákrovové stoly, vozíky, instrument, stolky, lehátka, přístroje - plochy odolné k alkoholu			BACILLOL AF	alkohol	postřik	30 sec.	A(B)TM(V)	Postřik - rozprašovačem nastříkat na plochy nebo předměty, rozetřít, nechat zaschnout; ubrousky - otřít vlhčeným ubrouskem, nechat zaschnout.	
	BACILLOL tiss. (použitelnost 3 měsíce po otevření)		alkohol	ubrousek	1 min.	rotaviry, MNV			
	MIKROZID UNIVERSAL wipes (použitelnost 1 měsíc po otevření)		alkohol, KAS	ubrousek	30 sec.	A(B)TM(V)			
					1 min.	rotaviry, MNV			
RYCHLÁ DEZINFEKCE MALÝCH PLOCH Z CITLIVÝCH MATERIÁLU (inkubátory, citlivé materiály, ultrazvukové sondy, LCD monitory)	BACILLOL 30 SENSITIVE foam		alkohol, KAS	postřik - pěna	2 min.	A(B)(V)	Postřik - rozprašovačem nastříkat na plochy nebo předměty, rozetřít, nechat zaschnout; ubrousky - otřít vlhčeným ubrouskem, nechat zaschnout.		
					1 min.	A(B)(V) + rotaviry			
	BACILLOL 30 SENSITIVE tiss. (použitelnost 3 měsíce po otevření)		alkohol, KAS	ubrousek	3 min.	A(B)TM(V) + MNV			
					3 min.	A(B)TM(V) + MNV			
DEZINFEKCE SPOJEK, KOHOUTŮ, BEZJEHLVÝCH VSTUPŮ, spoje a součásti infuzních souprav, biokonektory, před manipulací	PREVANTICS 2% CHG DEVICE SWAB		propanol, chlorhexidin 2%	ubrousek	1 min.	A(B)T(V)	Při rozpojení a napojení a ošetřování periferních a ČŽK, v případě viditelné kontaminace postup opakujte.		
	CITROCLOREX 2% MD (zelená etiketa)		chlorhexidin 2%, alkohol	postřik	1 min.	A(B)(V) + rotaviry			
VELKÉ PLOCHY	podlahy, stoly, nábytek, okenní parapety, postele, lehátka, transportní vozíky, nádoby na odpad a jiné		INCIDIN PRO	amin, alkohol, KAS (CAS:122-99-6)	0,5%	30 min.	A(B)V	Mytí s dezinfekčním účinkem: pracovním roztokem otřít plochy do mokra a nechat zaschnout.	
					1,5%	60 min.	A(B)TM(V) + MNV		
				0,25%	15 min.	A(B)(V)			
		SURFANIOS PREMIUM	KAS (CAS:2372-82-9)	0,5%	30 min.	A(B)TM(V)	Pracovním roztokem (rozpuštěno do minuty, nemíchat) otřít plochy do mokra a nechat zaschnout.		
	ANIOS OXYFLOOR	kyselina peroxyoctová	0,5%	30 min.	ABTM(V) + Cl.diff.				
DEKONTAMINACE BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU		BACILLOL 30 SENSITIVE tiss. (použitelnost 3 měsíce po otevření)	alkohol, KAS	ubrousek	1 min.	A(B)(V) + rotaviry	Biologický materiál překrýt utěrkou, nechat exponovat a poté ošetřit dezinfekčním přípravkem.		
					3 min.	A(B)TM(V) + MNV			
		ANIOS OXYFLOOR	kyselina peroxyoctová	0,5%	15 min.	A(B+)TM(V)	Pracovním roztokem (rozpuštěno do minuty, nemíchat) otřít plochy do mokra a nechat zaschnout.		
OSTATNÍ	výlevky, sifony, toalety, pisoáry, umyvadla, perliátory a sprchové růžice	CHLORAMIX DT	chlór	1 tbl /1,5 l vody	30 min.	ABCTMV	Zalít připraveným roztokem, nechat exponovat, nebo prolít připraveným roztokem.		
		DESAM PRIM	chlór	3%	30 min.	ABTV + Cl.diff.			
	rehabilitační vany, vířivky	INCIDIN PRO	amin, alkohol, KAS (CAS:122-99-6)	1%	5 min.	A(V)	Propláchnout připraveným roztokem, nechat exponovat, případně vypláchnout pitnou vodou.		
		CHIROSAN PLUS	kyselina peroxyoctová	0,5%	15 min.	A(B)(V)			
	nádoby a plochy určené pro styk s potravinami (kuchyňské linky, vnitřní povrch lednic apod.)			2%	10 min.	ABTMV			
		BOMIX PLUS	KAS	0,5%	15 min.	A(B)(V)			
		CHLORAMIX DT	chlór	1 tbl /1,5 l vody	30 min.	ABCTMV	Vložit do roztoku, plochy otřít, nechat exponovat, opláchnout pitnou vodou nebo umýt v myčce.		
		DESAM PRIM	chlór	3%	30 min.	ABTV+Cl.diff.			
	DESAM EXTRA	KAS, amin	1%	15 min.	A(B)(V)				
	dezinfekce ponorem - podložní mísy, močové láhve apod. - pokud není k dispozici myčka	CHLORAMIX DT	chlór	1 tbl /1,5 l vody	30 min.	ABCTMV	Vložit do roztoku, nechat exponovat.		
INCIDIN PRO		amin, alkohol, KAS (CAS:122-99-6)	0,25%	30 min.	A(B)(V)				
			0,5%	15 min.					
IZOLAČNÍ REŽIM	DEZINFEKCE RUKOU	STERILLIUM MED	ethanol	koncentrát	30 sec.	ABTM(V)/30 sec.	Minimálně 3 ml dezinfekčního přípravku nanést na suché ruce, vtírat stanoveným postupem minimálně 30 sec. dle doporučení výrobce.		
	NÁSTROJE A POMŮCKY	CHIROSAN PLUS	kyselina peroxyoctová	2%	15 min.	ABCTMV	Zcela ponořit do připraveného roztoku, nechat exponovat, dočistit, opláchnout pitnou vodou, osušit.		
	VELKÉ + MALÉ PLOCHY	ANIOS OXYFLOOR	kyselina peroxyoctová	0,5%	30 min.	ABTM(V)	Mytí s dezinfekčním účinkem: pracovním roztokem (rozpuštěno do minuty, nemíchat) otřít plochy do mokra a nechat zaschnout.		
				0,5%	60 min.	ABTM(V) + Cl.diff.			
				0,5%	15 min.	A(B+)TM(V) + Cl.diff.*			
	MALÉ PLOCHY - RYCHLÁ DEZINFEKCE	INCIDIN OXYFOAM S	H ² O ²	postřik - pěna	15 min.	A(B+)TMV + Cl.diff.	Pěnu rozprašovačem nastříkat na plochy nebo předměty a rozetřít, v případě použití ubrousků - otřít ubrouskem.		
					60 min.	ABCTMV			
					15 min.	A(B)(V)			
					30 min.	A(B+)TMV			
	nádobí, lékovky, drtičky a ostatní pomůcky přicházející do styku s potravinami	DESAM PRIM	chlór	3%	30 min.	A(B+)TM(V) + Cl.diff	Vložit do roztoku, nechat exponovat, opláchnout pitnou vodou.		
PROSTOROVÁ DEZINFEKCE	NOCOLYSE ONE SHOT	12% H ² O ² + dusičnan Ag	koncentrát	60 min.	A(B)(V)	Použití v souladu s návodem výrobce.			
	SANOSIL 15	7,5% H ² O ² + 0,0075% Ag	koncentrát	60 min.	A(B)(V)				
Vysvětlivky									
A		baktericidní vč. MRSA		M		mykobaktericidní			
(B)		virucidní proti obaleným virům		(V)		levurocidní (účinnost proti kvasinkám)			
(B+)		omezeně virucidní		V		fungicidní			
B		virucidní		Cl.diff.		účinný proti Clostridium difficile			
MNV		Norovirus		C		sporicidní			
T		tuberkulocidní		CŽK		centrální žilní katétr			
Pro ředění pracovních roztoků používejte studenou vodu.				Cl.diff.*		testováno s nižší biologickou zátěží			
Vypracovala:		MUDr. Lucie Barešková, Ph.D. - ústavní epidemiolog, Petra Křížová, Bc. Jana Sokolová, Jarmila Listíková, Alena Brandýská, Ivana Martinčová, Mgr. Hana Maříšková, Mgr. Lucie Vařešková							
Za dodržování odpovídá:		manažerka oboru, vrchní sestra, staniční sestra, vedoucí stravovacího provozu, vedoucí úklidu							
Platnost od: 3.12.2025				Identifikační číslo:		I_NPK_31_05			